



TM
CASADA
healthcare

relaxmyway

ROLLOPED

MASSAGEGERÄT | *MASSAGE DEVICE*

ROLLOPED – HEISS UND KALT, EIN ECHTES MASSAGEERLEBNIS!

ROLLOPED – HOT AND COLD THE UNIQUE MASSAGE AFFAIR!

Das Rolloped eignet sich perfekt für die Massage verspannter Muskeln an Rücken, Schultern, Bauch, Beinen und Füßen.

The Rolloped, perfect for back, abs, legs, calves, feet, and other tight muscles.

- > Kraftvolle 2–Stufen – Vibrationsmassage, bis zu 6000 U/min.
- > Schonende Silikonoberfläche mit weichen Noppen fördert die Durchblutung und löst Verspannungen.
- > Befüllbar mit heißem und kaltem Wasser, alternativ auch mit Eiswürfeln für das außergewöhnliche Massageerlebnis.
- > Erhältlich im typischen Casada-Rot.
- > Benötigt 2 AA Batterien.
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- > *Powerful 2-speed vibration massage, up to 6000 rpm.*
- > *Soft pointed silicone rubber surface promotes circulation.*
- > *Fill with hot or cold water to enhance the massage experience.*
- > *Available in Casada red.*
- > *Uses 2 AA batteries (not included).*




ROLLOPED

MASSAGEGERÄT | MASSAGE DEVICE



Reflexzonen
Reflexology

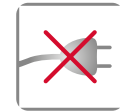

Unplugged
Unplugged



Vibration
Vibration



Kabellos
Wireless



Batterie
Battery





[1]
Deckel in Pfeilrichtung öffnen um die Batterien einzusetzen.
Follow the direction of arrow, open the battery cover gently.

[2]
Gummiring abnehmen und die Batterien unter Berücksichtigung von „+“ und „-“ einsetzen.
Install battery according to „+“, „-“, take down the rubber sheath.

[3]
Drehen Sie das Batteriefach fest zu und befestigen Sie den Gummiring am Deckel.
Follow the direction of arrow, install the battery cover well, fix the rubber sheath back.

[4]
Öffnen Sie den unteren Deckel um den Wassertank zu befüllen und schließen ihn anschließend wieder.
Open the bottom cover, fill with hot water or ice, then fix the cover back, massage body as you want.

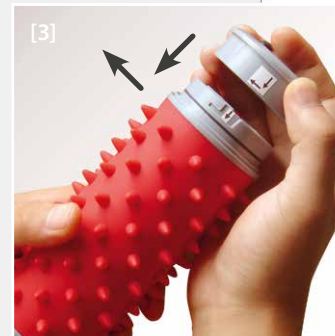

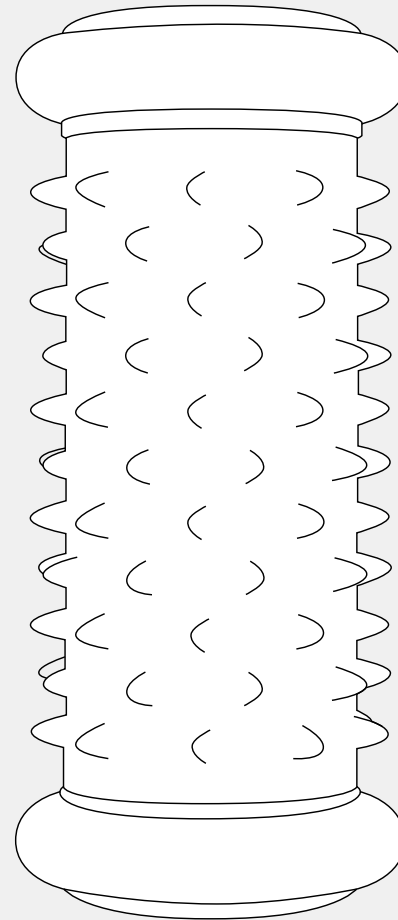

Maße | *Measurements:* 17 x 7,6 x 7,6 cm

Gewicht | *Weight:* 350 g

Batterie | *Battery:* 2 x 1,5 V AA

Zertifikate | *Certificates:*